

ul. Sadowa 7a, 95-100 Zgierz
tel. (+48 42) 717-19-76
717-19-78
tel./fax (+48 42) 716-15-18
717-15-81
fax (+48 42) 715 44 33
e-mail: filter@filter-service.eu
www.filter-service.eu

Instrukcja użytkowania półmasek higienicznych



Zastosowanie półmasek

- Półmaska higieniczna nie chroni bezpośrednio przed wirusami, służy do zakrywania nosa i ust zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia. Półmaska ogranicza dotykanie twarzy oraz emisję wydzielin użytkownika (kaszel, katar) zmniejszając tym samym ryzyko infekcji u osób w najbliższym otoczeniu.
- Półmaska higieniczna nie jest środkiem ochrony dróg oddechowych i w związku z tym nie podlega procedurze oceny zgodności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/425.
- Półmaska została wykonana z włókien poliestrowych posiadających atest OEKO-TEX® STANDARD 100.

Warunki użycia półmasek higienicznych:

- Należy zapoznać się i przestrzegać niniejszej instrukcji użytkowania.
- Użytkownik musi być zapoznany ze sprzętem i jego przeznaczeniem.
- Półmaska higieniczna nie może być stosowana w pomieszczeniach o nieodpowiedniej wentylacji i małej kubaturze (studzienki, kanały, zbiorniki itp.) ze względu na możliwość wystąpienia niedoboru tlenu (tj. poniżej 17% obj.).
- Półmaska higieniczna nie zapewni ochrony przed: pyłami, dymami, mgłami, gazami, parami, bakteriami i wirusami.
- Półmaska higieniczna nie może być stosowana gdy dla ww. zanieczyszczeń przekroczone jest najwyższe dopuszczalne stężenie (NDS).

Przechowywanie i konserwacja

- Półmaska higieniczna jest sprzętem jednorazowego użycia i nie wolno jej prać ani czyścić.
- Półmaskę higieniczną należy przechowywać w zamkniętych, nie uszkodzonych opakowaniach producenta, w pomieszczeniach o wilgotności względnej poniżej 90% i w temperaturze od -20 °C do +40 °C.
- Przy odpowiednim przechowywaniu czas składowania wynosi 5 lat.
- Półmaskę należy chronić przed działaniem agresywnych substancji chemicznych, wilgocią i zabrudzeniem.

Piktogramy



Instrukcja użytkowania musi być przestrzegana



Temperatura przechowywania od -20 °C do +40 °C



Wilgotność powietrza w pomieszczeniu składowania poniżej 90%



Data ważności – przy odpowiednim przechowywaniu – patrz nalepka

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100



PN-EN ISO 9001:2015

PN-N-18001:2004

PN-EN ISO 14001:2015

