

Zastosowanie produktu:

Przyłbica ochronna CoverOne znajduje zastosowanie jako uzupełniający element odzieży ochronnej, zmniejszający ryzyko związane z zakażeniami przenoszonymi drogą kropelkową. Chroni również błony śluzowe ust, oczu i nosa przed kontaktem z zanieczyszczonymi dłońmi czy przedmiotami oraz drobnymi urazami mechanicznymi.


Sposób mocowania:

1. Zanim założysz maskę, dokładnie umyj ręce.
2. Tarczę przyłbicy przymocuj za pomocą pokręteł do paska przytrzymującego.
3. Następnie przez otwory w pasku przewlec dokładnie gumkę i dopasuj rozmiar maski do kształtu głowy (zgodnie ze schematem).
4. Położenie tarczy możesz zmieniać poprzez odkręcanie i dokręcanie pokręteł mocujących po bokach przyłbicy i poruszanie tarczą w górę i w dół.
5. Pociągnij tarczę przyłbicy w dół, aby zakryła Twój nos i usta.

Konserwacja przyłbicy:

Tarczę frontową przyłbicy można odkręcić od paska przytrzymującego. Zdejmując przyłbicę po użyciu zwracaj baczność uwagę, aby nie dotykać jej wewnętrznej strony brudnymi dłońmi. Po kontakcie dłoni z zewnętrzną stroną przyłbicy, umyj je dokładnie.

Elementy przyłbicy możesz wykorzystywać wielokrotnie. Najlepiej konserwować je za pomocą środków czystości na bazie alkoholu (np. płyny do mycia okien blatów kuchennych bez granulek). Używanie gąbek, twardych ściereczek lub detergentów z granulatem może powodować zmatowienie gładkich powierzchni przyłbicy i wpłynąć negatywnie na jej przejrzystość.

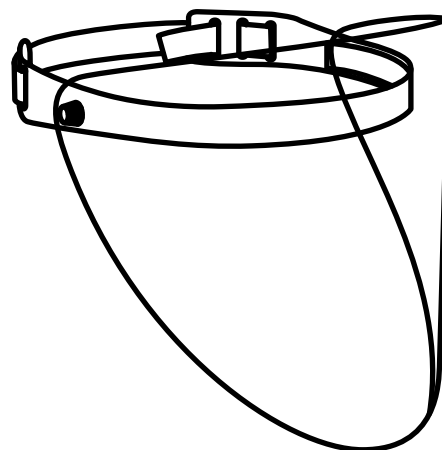

W celu dokładnej dezynfekcji elementów przyłbicy, zapoznaj się dokładnie z instrukcjami odpowiednich służb medycznych i posługuj się środkami przez nie wskazanymi.

Należy unikać wyparzania elementów maski w wodzie o temperaturze powyżej 50 stopni Celsjusza ze względu na możliwość ich odkształcenia. Do usuwania zabrudzeń i silnych tłuszczów można używać płynów na bazie wysokostężonego alkoholu izopropylowego.

Zawartość zestawu (może różnić się w zależności od wariantów)

1. Tarcza ochronna przyłbicy
2. Pasek przytrzymujący z pianką
3. Dwa pokręta mocujące
4. Taśma elastyczna

Producent

Tech Design Aleksandra Klimek
Grota Roweckiego 203
52-214 Wrocław
tel. 717895001
e: shop@coverone.pl
www.coverone.pl




COVER — ONE



INSTRUKCJA OBSŁUGI

przyłbicy ochronnej CoverOne

wersja 1.2, aktualizacja 15.03.2020 r.

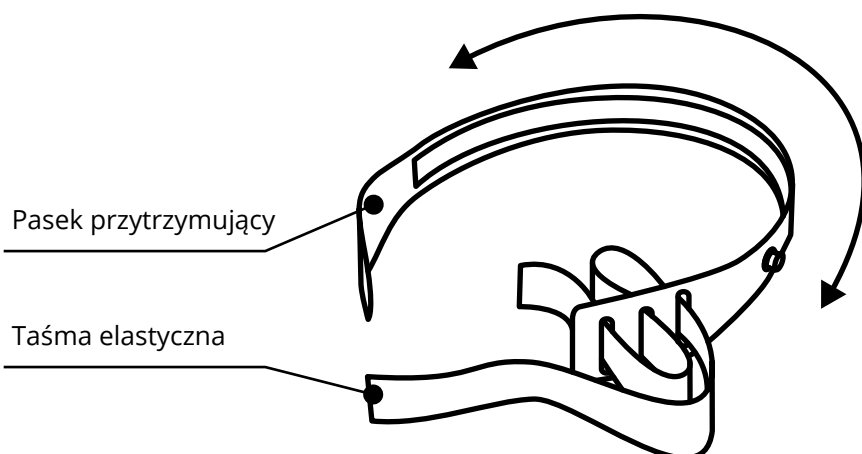

Sposób przewlekania taśmy elastycznej przez otwory w pasku Przytrzymującym

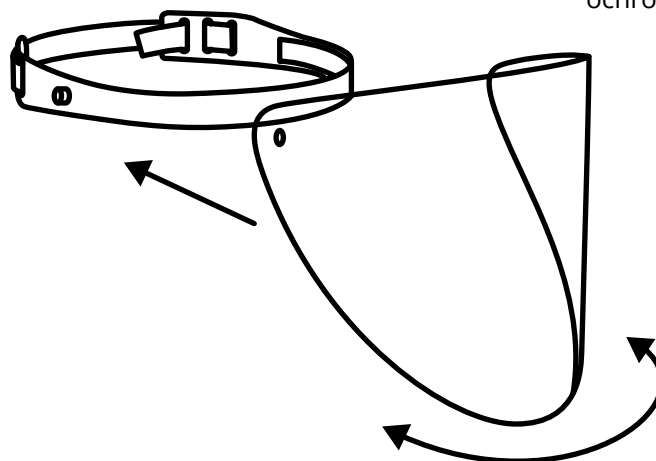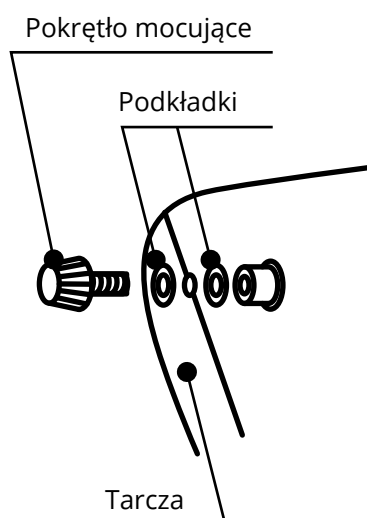

Sposób mocowania tarczy ochronnej przyłbicy

Zawartość zestawu

