



Przystona na usta i nos, przeznaczona do użytku indywidualnego.

Materiał: Przystona została wykonana z wysokiej jakości włókniny i folii PET, posiadającej certyfikat ISO 9001 oraz ISO 14001.

Wymiary:

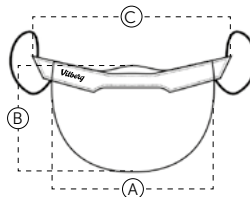

ROZMIAR	A	B	C	WAGA
KIDS	16 cm	10 cm	18,5 cm	6,0 g
S	17,5 cm	10,5 cm	20,5 cm	7,0 g
M	19,5 cm	10,5 cm	22,5 cm	7,3 g
L	20,5 cm	13,5 cm	24,5 cm	10,7 g

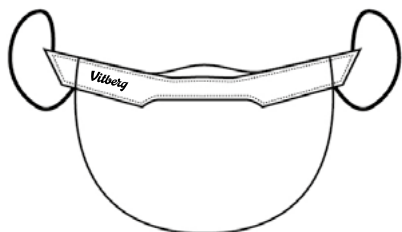

Zastosowanie: Środek ochrony indywidualnej.

Ochrona użytkownika przed czynnikami atmosferycznymi nie mającymi charakteru ekstremalnego.

Skuteczność działania: Badania techniczne zapewniają optymalny poziom ochrony, wymagany w przewidywalnych warunkach użytkowania.


Uwagi:

1. Unikaj dotykania przystony w czasie jej używania – gdy do tego dojdzie, umyj ręce.
2. Przystona jest przeznaczona do wykorzystania przez jednego użytkownika.
3. Przechowuj w oryginalnym etui.

Vitberg
Mini Shield

Środek ochrony
indywidualnej kategorii I

Zakładanie maski:

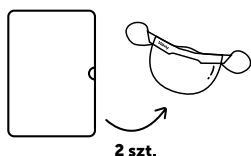

1. Wyciągnij przystonę z kartonu.




2. Umieść przystonę na twarzy naciągając gumki na uszy i dopasuj docisk na nosie. Chwytając delikatnie za gumki.

Zdejmowanie Vitberg Mini Shield:



1. Nie dotykając przodu przystony, zdejmij ją, chwytając delikatnie za gumki.

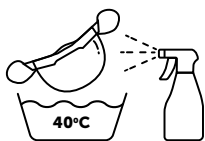

2. Przystonę zdezynfekuj po każdym użyciu za pomocą środka dezynfekującego lub wypierz ręcznie w wodzie z detergentem (max. 40°C). Maksymalna ilość prai: 30.



Wytwórcą przyston jest polski producent wyrobów medycznych:

ul. Borelowskiego 29
33-300 Nowy Sącz
tel.: + 48 18 442 33 69
mail: biuro@vitberg.com
www.vitberg.com

Wzór zgłoszony w Urzędzie Patentowym
Rzeczypospolitej Polskiej
oraz w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności
Intelektualnej (EUIPO).

Deklaracja zgodności dostępna na:

vitberg.com/images/dz_Vitberg_Mini_Shield.pdf

Poznaj nas bliżej



www.vitberg.com